



MASQUE EN TISSU




Couvrir du nez au menton en attachant les élastiques à l'arrière des oreilles.



Se laver les mains au savon et à l'eau ou au gel hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.



La durée du port doit être inférieure à 4h sur la même journée.

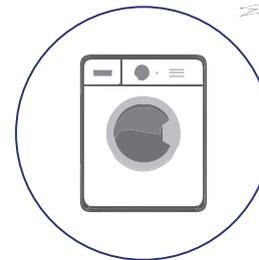

Privilégier un cycle de lavage complet. Programme coton, 30° conseillé.

MASQUE EN PAPIER




Couvrir du nez au menton en attachant les élastiques à l'arrière des oreilles.



Se laver les mains au savon et à l'eau ou au gel hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.




La durée du port doit être inférieure à 4h sur la même journée.

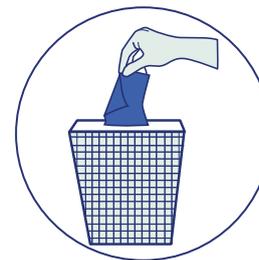

Jeter le masque en papier à la poubelle après usage.

VISIERE DE PROTECTION

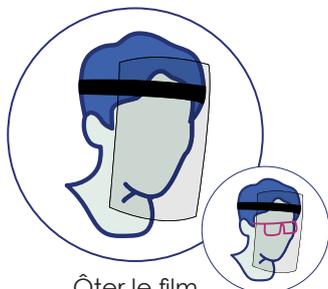


Ôter le film plastique avant utilisation. Compatible avec le port de lunettes.



Se laver les mains au savon et à l'eau ou au gel hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.



La durée du port de la visière **entre 2 nettoyages** ne doit pas excéder 4h.

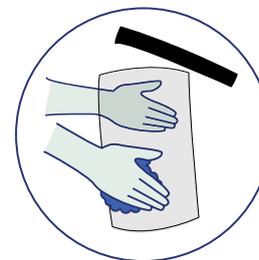

Nettoyer la visière avec une solution neutre.


GESTES BARRIERES & DISTANCIATION SOCIALE




Se laver les mains au savon et à l'eau ou au gel hydroalcoolique avant toute manipulation des masques ou visières.



Procéder au nettoyage des sols et de toutes les zones à risque à l'eau + solution désinfectante.

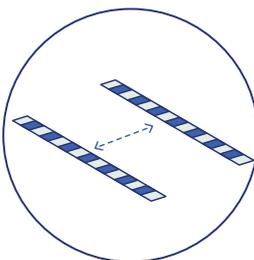

Respecter le marquage au sol de distanciation sociale. Minimum 1m.

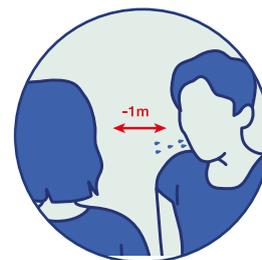

Respecter 1mètre de distance entre 2 personnes dans le cadre de la distanciation sociale.